

クリーンアタック

取扱説明書

貴金属用酸洗浄剤

ご使用に際してはこの取扱説明書の注意事項をよくお読み下さい。

本製品は、鑄造した金銀パラジウム合金及び金合金の酸化膜除去に適した酸化膜除去剤です。

【用途】

金銀パラジウム合金及び金合金で製作した鑄造体の酸化膜除去

【包装】

本剤 (140g) 添加剤 (22.5g) 計量スプーン 1個

【使用方法】

- ① 本剤(140g)と添加剤(22.5g)を 1.5 リットルの水道水に溶かしてください。
(本剤と添加剤を全て 1.5 リットルの水に溶かして、粉末が残留しても一晩放置すれば完全に溶解します。)
- ② 溶液を小分けして、ご使用ください。
- ③ 60℃程度に温度を上げると洗浄効果が上がります。
- ④ 超音波洗浄器を使用されると短時間で酸化膜が落ちます。

【特徴】

- ① 効果が長く続きます。
- ② 劇物毒物ではないので安心してご使用頂けます。
- ③ 従来品と比較して、洗浄時間が短縮されます。
- ④ 陶材焼付用金属の酸化膜の除去の場合は付属スプーンで塩酸を数滴加えれば効果的です。

【注意事項】

- ① 毒物劇物ではありませんが、直接手で触れないでください。
- ② もし、目に入った時は十分な水で洗い流してください。
- ③ 本材の溶液は酸性度の高い物です。排水の場合は中和してから排水してください。
- ④ 本材の溶液が、皮膚に触れた場合は、すぐに流水で洗浄し、発疹、皮膚炎等何らかの異常が現れた場合は、速やかに医師に相談してください。
- ⑤ 本材の溶液と他の商品と混合しないでください。
- ⑥ 本材の溶液を取扱説明書以外の目的で使用しないで下さい。

製造発売元



有限会社 アトミック

〒566-0001 大阪府摂津市千里丘 4-11-14

電話 06-6330-0428 FAX 06-6330-1655