

**取扱説明書を必ず参照する**

承認・届出等 販売名 UVシャワートリプル0

形状・構造及び原理等 質量 : 約 7.5kg

**警告**

上蓋をしっかりと閉じてからメインスイッチを入れて下さい。  
直接オゾンガスを吸引しないようにして下さい。

**使用目的、効能又は効果**

本製品は35Wオゾンランプ2灯と照射タイマーと冷却ファンからなり、UVシャワーとオゾン雰囲気をつくり出す。手術用器具・麻酔器具等をこの密閉スペースに一定時間保持する事により、乾式表面洗浄を行い手術用器具・麻酔器具等に付着した有機物の除去及び殺菌を行う事を目的とした装置です。

**品目仕様等**

**照射器本体**

電源 : AC100 50/60Hz 80W

ランプ特性 : 35WU字管 5<sup>φ</sup>ツッドスタート型ガン管 2灯

紫外線波長 253.7nm

ガンガス発生量 80ng/h(1灯)×2灯

タイマー フルスケール 10分 50分切替機能付き

オゾン吸着剤 : 活性炭(機械後部取付)

寸法 幅×高さ×奥行き 180×168×400(mm)

**操作方法又は使用方法等**

詳細については、取扱説明書ご参照下さい。


1. 電源コードをAC100V電源コンセントに接続します。
2. ステンレス受け皿の上に処理したい器具等を置きます。
3. 上蓋をしっかりと閉じます。(カチッとロックがかかる迄)
4. タイマーを所定時間(10分)にセットします。
5. プザ-スイッチをONにします。
6. メインスイッチをONにします。(紫外線の照射と同時に冷却ファンが回転します。)
7. 設定時間が終了するとプザ-で終了を報知します。
8. プザ-スイッチをOFFにします。必要に応じて2~3回の照射を行います。
9. ガンガス処理器と本体を接続します。
10. ホソッを使用してガンガスを分解装置に移動させます。(往復吸引6回)
11. プザ-スイッチをONにして少し上蓋を押し下げるとロックが外れます。
12. 上蓋を開けて、プザ-スイッチをOFFにして補綴物を取り出します。

**使用上の注意**


詳細については、取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。

1. 電磁ロックが働いている時に無理に蓋を開けない事。
2. 蓋の開閉はガンガスを分解効外に移動させてからにする事
3. 蓋を開けた状態でメインスイッチを入れない事。
4. 上蓋を閉める際は、ガンランプに衝撃を与えないように注意して取り扱う事。
5. 照射発生中のガンガスは吸引しない事。(時間経過(30~60分程度)に伴い自動分解され、人体有害性が低下します)
6. 照射光を直視したり、人に向かって照射しない事。又漏れた光に対しても直視しない事。
7. 本器を記載の使用目的以外では使用しない事。
8. 本器を使用中に異常を感じたら直ちに使用を中止して、取り扱い説明書等に従って、点検又は修理依頼をする事。


**1. 製品外観図**

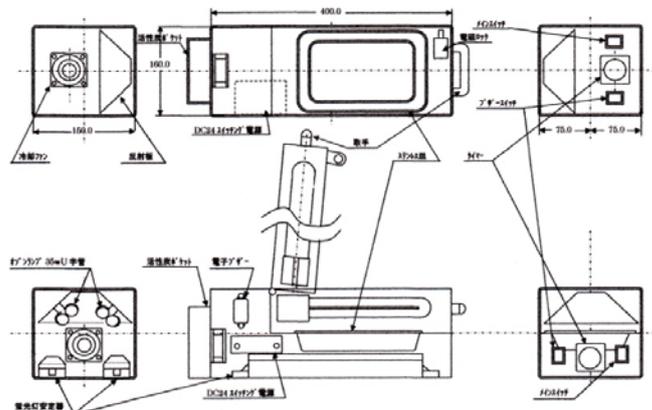

**電気配線図**

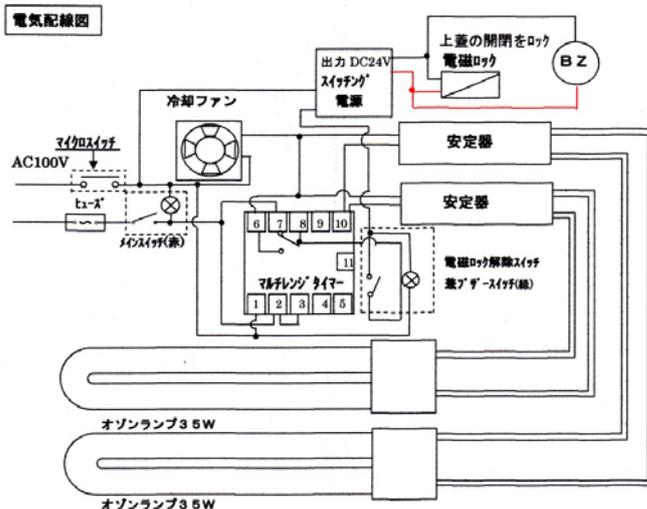

**オゾン分解装置概略図**

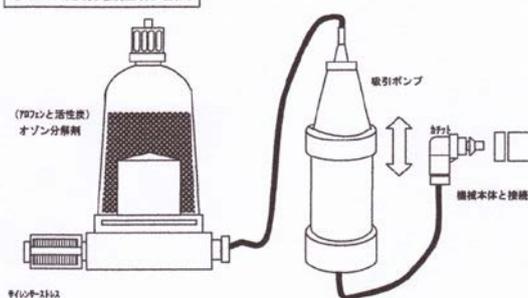

- 9.本器は歯科医療有資格者以外は使用しない事。
10. 密閉された部屋の場合は必ず換気をしながら使用する事。
11. 濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない事。
12. コードを持って強く引き抜く等無理な力を加えない事。
- 13.強いオゾン臭や喉に痛みを感じた場合は、即換気扇にて換気を行う事。
- 14.本器を改造しない事。

#### **設置上のご注意**

1. 直射日光、火気、ストーブの近く等、高温になる場所での使用や放置はしない事。
2. 本器、オゾンガス処理装置に水や薬液がかからない様にする事。
3. 本器は引火性の麻酔剤と空気又は亜酸化窒素と混合した環境下での使用はしない事。
4. 設置時は安定した場所に設置する事。照射器本体を落下させないよう設置場所を選定する事。
5. オゾンガスは、金属、樹脂等に対して腐食性があります。機械近辺には腐食しやすい物は置かないようにする事。

#### **保守・点検に係る事項**

- 1 毎月一度、オゾンランプのウォータガラスの汚れをチェックし、必要であれば、アルコールを含ませた柔らかい布等でホリや汚れを拭き取って下さい。
- 2.機械設置場所周辺は、埃等を吸い込まないよう清潔に保って下さい。
3. 照射中、オゾンガスの臭いが強くなってきた場合は、活性炭を交換して下さい。
4. ステンレス受け皿も埃や汚れの無い様に清潔に保って下さい。
5. サルファーミスからオゾン臭が漏れてくるようになった場合は、オゾン分解剤を交換して下さい。

#### **【ご注意】**

- 1.ランプソケットは絶対に濡らさないで下さい。
- 2.照射と同時に冷却ファンが作動します。通気性を高める為、本器後部には適度なスペースを明けて下さい。

#### **製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等**

氏名又は名称 有限会社 アトミック

第三種医療機器製造販売業

住所等 〒534-0023 大阪市都島区都島南通1丁目14-4 電話番号 TEL 06-6330-0428 FAX 06-6330-1655