

類別名称: 歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器器 一般名称: 歯科用キャストワックス JMDMコード: 16189000

販売名 スーパーインテリアワックス

形状・構造等

形状: 缶入

成分: 天然ワックス、レジン、パラフィンワックス及び微結晶系の炭化水素を主成分とする混合物

使用目的、効能又は効果

使用目的・用途

ロストワックス法による固定式補綴修復物の蠟型作成用のキャストワックスを言う

品目仕様等

物性的性質

融点	50°C
----	------

操作方法又は使用方法等

1) ワックスパチュラを加熱し、ワックス表面を溶解し石膏模型上に盛りつけながら成形します。

使用上の注意

(1) 使用注意

- ① 本剤は可燃性であるので、使用の際、火傷しないよう注意する事。
- ② 本剤は、(使用目的、効能又は効果)の項に記載の用途以外に使用しない事。
- ③ 本剤は歯科医療有資格者以外は、使用しない事。

貯蔵・保管方法及び使用期間等

1) 貯蔵・保管方法

- ① 室温保管
- ② 本剤を高温となる場所(ストーブの側、直接日光の当たる場所等)に放置しない事。
- ③ 使用及び保管場所には、消火設備を備える事。
- ④ 本剤は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しない事。
- ⑤ 本剤は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する事。

2) 使用期間 (製造日から10年間とする。)

包装 質量 30g(缶入)

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等

製造販売元 : 株式会社 東洋化学研究所

製造元 : 同

住所 : 〒173-0004 東京都板橋区板橋 4-25-12

電話 03-3962-8811 FAX 03-3961-1859

販売元 : 有限会社 アトミック

住所 : 〒566-0001 大阪府摂津市千里丘 4-11-14

電話 06-6330-0428 FAX 06-6330-1655

取扱説明書等を必ずご参照ください。